

**らくらくマウスⅡ**  
**取扱説明書**  
 特定非営利活動法人  
**ことステップ**

この度は、らくらくマウスⅡをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

発送には、十分な検査と入念な梱包につとめておりますが、破損・汚損・故障などがございましたら、ご一報くださいますようお願いいたします。

今後も、ご期待にそえる製品をお届けするよう努力して参りますので、どうぞよろしくお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

**この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。**

対応機種 標準で USB 端子のある機種、Windows 機、Macintosh機などです。

対応 OS は、Windows 7/8/10、MacOS X です。

●この取扱説明書の中に出てくる用語で分からないものがありましたら、お使いのパソコン、OS マニュアル等でお確かめください。



**◆安全にお使いいただくために◆**

水気・ほこり・熱などを避け、衝撃を加えないでください。

お客様ご自身による本体の分解・改造またはケーブルの加工などを行なわないでください。

ケーブルを無理に曲げる・ねじる・引っ張るなどの操作は故障または怪我をするおそれがあります。

**◆つなぎ方は◆**

①らくらくマウスⅡのケーブルコネクタをパソコンのUSB端子に、しっかりと差し込みます。

②初めて、USBを接続した場合は、Windowsのプラグ&プレイの機能が働き、自動的にUSBドライバを読み込みます。(自動的に読み込まない場合は、WindowsのCD-ROMを用意し、画面メッセージに従います)

※USB端子が複数ある場合、初回に挿したUSB端子は「新たな接続」と認識され、ドライバのインストールを求めてきます。USBハブを使用する場合は、供給電力の総量にご注意ください。

**◆故障かな？◆ 連絡をする前に確認してみましょう！**

状 況	原 因	対 処
パソコンの電源を入れてらくらくマウスを動かしたが、何の反応もない。(スピードランプが点滅・点灯しない。)	マウスとパソコン本体の差し込みは抜けていませんか。また、差し忘れていませんか。	差し忘れていないか、抜けていないかを確認して、奥まで差し込みます。
差し込みは問題ないのに、らくらくマウスを動かしても、何の反応もない。	USBのドライバのインストールを忘れていませんか。	WindowsのCDを用意してUSBのドライバをインストールする。
マウスの左右のボタンの機能が逆になっている。(Windows上で動かす場合)	Windowsコントロールパネルのマウスの項目で、機能が逆に設定されていませんか。	Windowsコントロールパネルのマウスの項目で、元の設定に変更します。


※上記の状況に対処できない、または原因が掴めない場合は当社まで連絡をお願いします。

## ◆動かし方は◆

### ■ポインタの移動

①ボタン(青色)は上下・左右・斜めに移動させる移動ボタンです。進めたい方向のボタンを押します。ボタンを押している間は移動し離すと止まります。

※ジョイスティック型は操作レバーを倒した8方向に移動します。

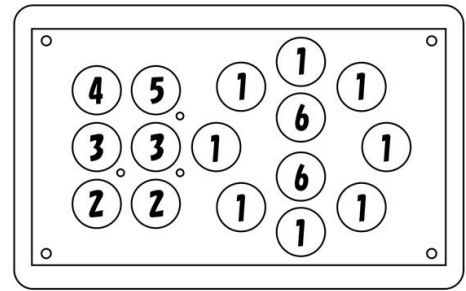

### ■クリック

②ボタン(緑色)はクリックボタンです。クリックする時に押します。

### ■ドラッグ

③ボタン(黄色)はドラッグボタンです。ドラッグを始めたところで、ボタンを押します。ドラッグ中を示す黄色ランプが点灯します。

ドラッグを終わらせたいところで、ドラッグボタンを押すと、ドラッグが解除されランプも消えます。

### ■左ダブルクリック

④ボタン(緑色)は、左ダブルクリックボタンです。1回押すと、左クリックボタンを2回押したことになります。

### ■ポインタの移動速度設定

⑤ボタン(橙色)は、ポインタの移動速度を設定するボタンです。押す度に、ポインタの移動速度(低速→遅い→中速→速い→高速→自動加速)が設定できます。

5段階目までは、点滅する橙色ランプがポインタの移動速度を表示します。

6段階目は橙色ランプが点灯します。①ボタンを押し続けると、ポインタの移動速度がじょじょに早くなる自動加速設定です。

らくらくマウスは、パソコンの電源を切った時の速度を記憶しています。次にパソコンを使うときは前と同じ速度で動作します。その都度設定する必要はありません。

### ■上下スクロール

⑥ボタン(灰色)は、スクロールボタンです。スクロールバーにマウスポインタを合わせなくても、このボタンを使えば、簡単に上下スクロール操作ができます。

## ◆初期不良、修理、部品の交換◆

通常の使用において発生した不具合、故障については、納入後1年間は無償修理といたします。

ただし、分解・改造、不適当な取扱いによる不具合・故障については有償修理とさせていただきます。

ボタンやスイッチ類の部品交換、Wirelessへの改造などのお見積をいたします。

※ 修理、部品交換、改造などのご要望は、「こことステップ」にご連絡をお願いします。

修理品等の送り先をお知らせいたします。

購入年月日

製造番号



特定非営利活動法人

こことステップ

〒194-0036 東京都町田市木曽東4-19-27

アメニティハイツ93-105

Tel: 042-794-3513 Fax: 042-794-3516

E-Mail:

mouse@kktstep.org